

Руководство по сбору мочи вакуумной системой.

Для сбора мочи пациенту выдаётся стерильная баночка.
После сбора мочи пациент отдаёт баночку мед.сестре.
Мед.сестра заполняет пробирки собранной мочой, соответственно заказу врача, не позднее **15 минут** от сбора мочи.
В лабораторию следует доставить только заполненные и маркированные пробирки не позднее, чем в течение 3 часов.

NB! Пробку с вакуумной пробирки не снимать!

Порядок заполнения пробирок:

1. Первой заполняется пробирка, содержащая консервант с чёрно-жёлтой пробкой на микробиологические исследования.
Хранить мочу при температуре +25 °С.
2. Второй заполняется пробирка с жёлтой пробкой без добавок на общий анализ мочи и если есть назначение, и на биохимические исследования.
По возможности хранить мочу при температуре +2 до +8 °С.

Сбор мочи для анализа



Вымойте тёплой водой руки и гениталии.

Не используйте мыла или каких-либо дезинфицирующих средств.




Снимите со стаканчика крышку и положите наклейку вниз.

NB! Не отклеивайте наклейку с крышки стаканчика!



ВНИМАНИЕ!
Не касаться внутренней поверхности крышки!

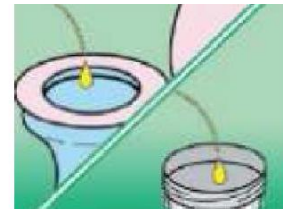

Для анализа требуется средняя порция мочи. Начиная мочеиспускание в унитаз затем направьте струю мочи в контейнер для сбора пробы, заполнив его на 2/3, не менее 50мл. Аккуратно закройте контейнер.



Снимите защитную наклейку с крышки.



Не снимайте пробку с пробирки!
Вставьте пробирку пробкой вниз в отверстие крышки до упора. Пробирка сама начнет наполняться мочой. При необходимости наполните и другие пробирки. Закройте отверстие банки наклейкой.



Поверните пробирку вверх-вниз 8-10 раз, чтобы находящийся в пробирке консервант растворился.



Оставшуюся в банке мочу вылейте в унитаз, а саму банку выбросьте в бытовые отходы.