







Vaakumkatsutite verevõtu järjekord

Korgi värvus	Katsuti nimetus	Lisand	Kasutusala	Segamine
<p>Roheline Oranz Kollane</p> 	<p>BacT/ALER FA BacT/ALER FN BacT/ALER PF</p>		<p>Mikrobioloogilised uuringud</p>	<p>3-4 korda</p>
<p>Helesinine musta rõngaga</p> 	<p>9NC-katsuti</p>	<p>Naatriumtsitraat</p>	<p>Hüübimisuuritud</p>	<p>4-5 korda</p>
<p>Must</p> 	<p>4NC-katsuti</p>	<p>Naatriumtsitraat</p>	<p>Erütrotsüütide settekiiruse määramine</p>	<p>5-10 korda</p>
<p>Punane kollase rõngaga</p> 	<p>Geeli ja hüübimis- aktivaatoriga katsuti</p>	<p>Geel ja hüübimisaktivaator</p>	<p>Kliinilise keemia, immunoloogilised, virooloogilised uuritud</p>	<p>5-10 korda</p>
<p>Lilla musta rõngaga</p> 	<p>K2E/K3E- katsuti</p>	<p>K2-EDTA</p>	<p>Hematoloogilised ja immuun- hematoloogilised (AB0 ja RH(D)) uuritud</p>	<p>5-10 korda</p>
<p>Hall musta rõngaga</p> 	<p>Glükolüüsi inhibiitoriga katsuti</p>	<p>Naatriumfluoriid/ kaaliumokalaat</p>	<p>Glükoosi ja laktaasi määramine</p>	<p>5-10 korda</p>